

# otowel ACQUA

Dispositivo Médico Classe I

Spray nebulizador

Para secagem da água e da humidade no canal auditivo

**Otowel Acqua** é um produto excicante para a eliminação da água e da humidade do canal auditivo, formulado para aliviar o desconforto do ouvido causado pela água que ficou retida após atividade aquática.

**Otowel Acqua** previne os efeitos nocivos resultantes da dor e de infeções bacterianas ou fúngicas.

**Otowel Acqua** combina a sua fórmula exclusiva a um spray nebulizador patenteado.


**Quando se deve usar Otowel Acqua?**


Após atividades aquáticas como natação, mergulho, banho, duche, etc.

**Como é que Otowel Acqua funciona?**

A fórmula de Otowel Acqua spray nebulizador tem características físico-químicas especiais que quando em contacto com a água são ativadas, provocando a completa evaporação da água e a eliminação da humidade do canal auditivo. O mecanismo em micro-spray permite uma dispersão ideal de **Otowel Acqua** no ouvido, com resultados imediatos.

**Ingredientes:** Álcool Isopropílico, Glicerina, Óleo de Rosas.

 **Instruções de uso:** Aplicar 1 a 2 nebulizações no ouvido afetado. A evaporação completa da água ou humidade retida no canal externo ocorre cerca de 2 a 3 minutos após nebulização. Se necessário, repetir a nebulização.

 **Advertências:** Não deve ser usado em casos de tímpano perfurado; Não usar em caso de utilização de tubos de ventilação do ouvido; Manter longe da vista e do alcance das crianças; Evitar contacto com os olhos; No caso de contacto com os olhos, enxaguar imediatamente com água em abundância e procurar ajuda médica; Manter longe de fontes de ignição - não fumar.

 **Altamente inflamável.**

**Apenas para uso externo.**

**Condições de armazenamento:** Armazenar em lugar fresco, não expor a temperatura acima de 50°C. Não colocar no fogo após utilização. O prazo de validade do dispositivo é de 36 meses conforme indicado na embalagem.

Em caso de incidentes graves, notifique o Fabricante e a Autoridade Competente.

Última revisão: 06/2025



Naveh Pharma (1996) Ltd.  
11-19 Yad Harutzim St., P.O.B. 8139  
Netanya 4250519, Israel.  
[www.navehpharma.com](http://www.navehpharma.com)



**IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:**

Tecnifar S.A.  
Rua José Da Costa Pedreira,  
Nº 11 - B - Torre Sul  
1750-130 Lisboa, Portugal  
Tel. +351 210 330 700

EC REP

Obelis S.A.  
Bd. Général Wahis 53,  
1030 Brussels, Belgium

