

otowel CERA

Dispositivo Médico Classe I

Spray nebulizador para dissolver e limpar
Para remoção da cera do ouvido

A cera do ouvido, ou cerúmen, é uma secreção normal das glândulas do ouvido. Um excesso de cera pode levar a inúmeros efeitos indesejáveis, incluindo perda de audição, desconforto, dor e tosse. A perda de audição acontece quando a cera acumulada fecha o canal auditivo, reduzindo ou prevenindo que as ondas sonoras atinjam o tímpano. O desconforto ou dor podem ocorrer nos casos em que a cera comprimida pressiona o tímpano. A tosse pode acontecer nos casos em que a cera compactada estimula os nervos partilhados pela garganta e canal auditivo, provocando uma sensação na garganta que pode levar à tosse.

Otowel Cera é um spray eficaz, natural e seguro para dissolver e limpar a cera acumulada.

Otowel Cera combina ingredientes que exercem uma limpeza mecânica, com a segurança e eficácia do óleo natural de oliveira.

Ao usar **Otowel Cera**, o cerúmen é dissolvido e gradualmente removido do ouvido, utilizando o próprio mecanismo natural de limpeza e eliminação.

O mecanismo em micro-spray permite uma dispersão ideal no canal auditivo.

Ingredientes: Olivaxol™, Óleo de oliveira, Óleo de hortelã.

Indicações: Para a dissolução e remoção da cera do ouvido externo e canal auditivo, em bebés acima de 3 meses, crianças e adultos.

Instruções de uso: Aplicar 1 a 2 nebulizações em cada ouvido, três vezes por dia até à dissolução da cera. Em casos mais difíceis, esticar o canal auditivo, puxando suavemente o lóbulo superior da orelha para cima e para trás da cabeça. Esta pequena manobra, permite uma melhor penetração dos ingredientes ativos nas partes mais internas do canal auditivo.

Para prevenção da acumulação de cera: Aplicar 1 a 2 nebulizações em cada ouvido, uma vez por dia.

Advertências: Não deve ser usado em casos de tímpano perfurado; Não usar em caso de utilização de tubos de ventilação do ouvido; Manter longe da vista e do alcance das crianças; Evitar contacto com os olhos.

Apenas para uso externo.

Condições de armazenamento: Armazenar em lugar fresco, não expor a temperatura acima de 50°C. O prazo de validade do dispositivo é de 36 meses conforme indicado na embalagem.

Em caso de incidentes graves, notifique o Fabricante e a Autoridade Competente.



Naveh Pharma (1996) Ltd.
11-19 Yad Harutzim St., P.O.B. 8139
Netanya 4250519, Israel.
www.navehpharma.com



Obelis S.A.
Bd. Général Wahis 53,
1030 Brussels, Belgium



TECNIFAR
CONSUMER HEALTH

Última revisão: Ver. 4 09/2025

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:
Tecnifar S.A.
Rua José Da Costa Pedreira,
Nº 11 - B - Torre Sul
1750-130 Lisboa, Portugal
Tel. +351 210 330 700